

Axon k-86 mini audifono sonido amplificador volumen ajustable personal invisible, ayuda audición claro para la pérdida de escucha del Anciano. Ahora puede mirar la película, disfrutar del drama, asistir a la reunión o entender las clases, El producto puede ayudarlo a escuchar el sonido claramente y en voz alta.

DATO GENERAL.

- Marca: AXON
- Modelo: K-86

ESPECIFICACIONES:

- Salida de sonido máxima: 110 + 5dB
- Ganancia de sonido: 30dB
- Distinción total de la onda armónica: <1 0%
- Rango de frecuencia: 300 4000 Hz
- Ruido de entrada: 40dB
- Voltaje: D.C.1.5V
- Corriente: 4Ma
- Batería: AG5 & A13

Cómo usarlo:

1. Abra el compartimiento de la batería,
 2. Inserte el tapón auditivo en la audición coloca la batería correspondiente.
- Luego coloque el tapón en su oído con fuerza, y muévelo hacia arriba y hacia abajo para asegurarlo en la posición correcta.
3. Encienda el audifono, luego puede ajustar el volumen para obtener un sonido claro.

a. Interruptor de encendido / apagado del compartimiento de la batería: cierre el compartimiento de la batería completamente, comienza a funcionar, abra el compartimiento de la batería y dejará de funcionar.

b. Interruptor de encendido / apagado: enciende o apaga el audifono

4. Si sientes el silbido, asegúrate de colocar el tapón del oído con firmeza. use un tapón para los oídos de tamaño adecuado

5. Saca la batería o apaga el audifono cuando dejes de usar el audifono. (Nota: asegúrese de que el audifono esté en la posición "apagado" o que el volumen esté en el mínimo volumen de "1", de lo contrario el sonido instantáneo te hará sentir incómodo



PESO Y TAMAÑO

- Tamaño del paquete: 100x33x76mm
- Peso del artículo: 58 Gr.

CONTENIDOS DEL PAQUETE

- 1 * Unidad de amplificador de sonido de oído.
- 1 * manual de instrucciones
- 3 * unidades de enchufe o tapón de diferentes tamaños.



GRUPO C&M

RPC : 992033862

RPC: 992033492

Tel: 386-0964

www.grupocym.pe

comercial@grupocym.pe

Calle Los Álamos Mz. F2 Lote A8 Urb. Campoy - SJL.