

FICHA TÉCNICA



AUDIFONO PARA SORDERA AXON F-138 ORTOPEDICO

Axon F-138 mini audífono sonido amplificador volumen ajustable personal invisible, con batería recargable, ayuda audición claro para la pérdida de escucha del Anciano. Ahora puede miras la película, disfrutar del drama, asistir a la reunión o entender las clases, El producto puede ayudarle a escuchar el sonido claramente y en voz alta.

DATO GENERAL.

- Marca: AXON
- Modelo: F-138

ESPECIFICACIONES:

- Salida de sonido máxima: 130 +/- 5dB
- Ganancia de sonido: 35dB
- Distinción total de la onda armónica: <5%
- Rango de frecuencia: 300 - 4000 Hz
- Ruido de entrada: 30dB
- Corriente: 4mA
- Voltaje: 1.5V
- Batería : AG13 pila de botón

Cómo usarlo:

1. Abra el compartimiento de la batería,
2. Inserte el tapón auditivo en la audiencia coloca la batería correspondiente.
Luego coloque el tapón en su oído con fuerza, y muévalo hacia arriba y hacia abajo para asegurarla en la posición correcta.
3. Encienda el audífono, luego puede ajustar el volumen para obtener un sonido claro.

a. Interruptor de encendido / apagado del compartimiento de la batería: cierre el compartimiento de la batería completamente, comienza a funcionar, abra el compartimiento de la batería y dejará de funcionar.

b. Interruptor de encendido / apagado: enciende o apaga el audífono

4. Si sientes el silbido, asegúrate de colocar el tapón del oído con firmeza. use un tapón para los oídos de tamaño adecuado

5. Saca la batería o apaga el audífono cuando dejes de usar el audífono.
(Nota: asegúrese de que el audífono esté en la posición "apagado" o que el volumen esté en el mínimo volumen de "1", de lo contrario el sonido instantáneo te hará sentir incómodo)



PESO Y TAMAÑO

- Tamaño del paquete: 98mm x 35mm x 75mm.
- Peso del paquete: 64 Gr.

CONTENIDOS DEL PAQUETE

- 1 * Unidad de amplificador de sonido de oído.
- 1 * manual de instrucciones Ingles
- 2 * unidades de enchufe o tapón de diferentes tamaños.
- 1* unidades de Repuesto cavidad interna.



GRUPO C&M

RPC : 992033862

RPC: 992033492

Tel: 386-0964

www.grupocym.pe

comercial@grupocym.pe

Calle Los Álamos Mz. F2 Lote A8 Urb. Campoy - SJL.